




Kleur van de wond	Hoeveelheid wondvocht	Primaire verbandkeuze/Oppervlakkige wond. Zorg dat het wondproduct contact maakt met de wondbodem!	Diepe wond (= wond dieper dan 1,5 cm)
 <p>ROOD</p> <ul style="list-style-type: none"> - beschermen - vochtig wondmilieu - bacterieel evenwicht - stimuleren wond-genezing 	<p>Infectie?</p> <p>Nee →</p> <p>Ja →</p>	<p>Is de wond nat, vochtig of droog?</p> <p>Nat → Afdekken met Kliniderm foam of Kliniderm superabsorbent dressing</p> <p>Vochtig → Afdekken met Kliniderm foam (silicone) of Klinipress exsupad of Klinipress novopad</p> <p>Droog → Kliniderm silicone wound contact layer Afdekken met Klinipress non woven compress</p>	
		<p>Is de wond nat, vochtig of droog?</p> <p>Nat → Mesitran soft/zalf Afdekken met Kliniderm foam of Kliniderm superabsorbent dressing</p> <p>Vochtig → Mesitran soft/zalf Afdekken met Kliniderm foam (silicone)</p> <p>Droog → Mesitran soft/zalf of Mesitran tulle Afdekken met Kliniderm foam (silicone) lite of Klinipress non woven compress of Kliniplast non woven eilandpleister (border)</p>	
 <p>GEEL</p> <ul style="list-style-type: none"> - reinigen - bacteriën bestrijden - vochtig wondmilieu - stimuleren wond-genezing 	<p>Infectie?</p> <p>Nee →</p> <p>Ja →</p>	<p>Is de wond nat, vochtig of droog?</p> <p>Nat → Kliniderm alginate Afdekken met Kliniderm foam, Klinipress exsupad of Kliniderm superabsorbent dressing</p> <p>Vochtig → Mesitran net/border/zalf of Kliniderm alginate Afdekken met Klinipress exsupad of Kliniderm foam</p> <p>Droog → Mesitran net/border/zalf of Kliniderm silicone wound contact layer Afdekken met Klinipress non woven compress of Klinipress exsupad</p>	
		<p>Is de wond nat, vochtig of droog?</p> <p>Nat → Necrotectomie door behandelaar*, Mesitran zalf Afdekken met Kliniderm foam, Klinipress exsupad of Kliniderm superabsorbent dressing</p> <p>Droog → Necrotectomie door behandelaar*, daarna Mesitran soft/zalf/tulle/border Afdekken met Kliniderm silicone wound contact layer en/of Klinipress non woven compress</p>	
 <p>ZWART</p> <ul style="list-style-type: none"> - reinigen - necrose bestrijden - bacteriën bestrijden 	<p>Infectie?</p> <p>Nee →</p>	<p>Is de wond nat, vochtig of droog?</p> <p>Nat/Vochtig → Necrotectomie door behandelaar*, Kliniderm alginate of Mesitran zalf/net/border Afdekken met Kliniderm foam of Klinipress exsupad of Kliniderm superabsorbent dressing</p> <p>Droog → Kliniderm silicone wound contact layer en/of Klinipress non woven compress</p>	
		<p>Is de wond nat, vochtig of droog?</p> <p>Nat → Necrotectomie door behandelaar*, opvullen met Mesitran soft/zalf op Klinipress non woven compress of op een Kliniderm alginate (cavity) Afdekken met Kliniderm foam of Kliniderm superabsorbent dressing</p> <p>Droog → Necrotectomie door behandelaar*, opvullen met Mesitran soft/zalf op Klinipress non woven compress of op een Kliniderm alginate (cavity) Afdekken met Kliniderm foam (silicone) of Klinipress novopad</p>	
		<p>Is de wond nat, vochtig of droog?</p> <p>Nat → Mesitran soft/zalf op Klinipress non woven compress of op een Kliniderm alginate (cavity) Afdekken met Kliniderm foam of Kliniderm superabsorbent dressing</p> <p>Vochtig → Opvullen met Mesitran soft/zalf op Klinipress non woven compress of op een Kliniderm alginate (cavity) Afdekken met Kliniderm foam (silicone) of Klinipress exsupad</p> <p>Droog → Opvullen met Mesitran soft/zalf Afdekken met Kliniderm foam (silicone) lite of Klinipress non woven compress</p>	

* Na necrotectomie opnieuw de wond beoordelen.

PRODUCTKEUZE	EIGENSCHAPPEN	AANDACHTSPUNTEN
Kliniderm foam (silicone)	<ul style="list-style-type: none"> • Groot absorptievermogen • Verticale vochtopname • Silicone fixatielaag is huidvriendelijk 	<ul style="list-style-type: none"> • Bij zeer natte wonden te weinig absorptievermogen • Mag niet i.c.m. een Hypochloriet (eusol) gebruikt worden • Altijd ongeveer 2 cm over de wondranden aanbrengen • Maximaal 7 dagen laten zitten
Kliniderm alginate	<ul style="list-style-type: none"> • Neemt veel vocht op • Vormt een gel i.c.m. wondvocht • Makkelijk te verwijderen • Geur- en pijn reducerend • Ondersteunt autolitisch debridement 	<ul style="list-style-type: none"> • Moet binnen de wondranden worden aangebracht • Kan 3 tot 6 dagen blijven zitten
Mesitran (honingpreparaat)	<ul style="list-style-type: none"> • Antibacterieel • Schimmeldodend • Ontstekingsremmend • Ondersteunt autolitisch debridement • Stimuleert de wondgenezing • Kan meerdere dagen op de wond blijven afhankelijk van wondvochtproductie 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesitran hydro en border geschikt voor vochtige wonden • Mesitran net voor natte wonden • Mesitran soft kan bij alle typen • Mesitran zalf goed toe te passen als necroseoplosser • Mesitran tulle voor droge/matig vochtige wonden • Niet i.c.m. AG/zilver
Kliniderm silicone wound contact layer	<ul style="list-style-type: none"> • Gemaakt van siliconen • Skin tear volgens protocol voor behandeling • Ter bescherming van rood weefsel 	<ul style="list-style-type: none"> • Afdekken met een secundair verband • Voor eenmalig gebruik • Mag tot 7 dagen blijven zitten • Let op: verband heeft 2 schutvellen die beide verwijderd dienen te worden
Klinipress novopad (absorberend verband)	<ul style="list-style-type: none"> • Neemt licht tot matig vocht op • Met polyethyleen toplaag 	<ul style="list-style-type: none"> • Dagelijkse verbandwissel
Klinipress exsupad (absorberend verband)	<ul style="list-style-type: none"> • Neemt veel vocht op • Heeft een hydrofobe achterzijde • Wattenvulling 	<ul style="list-style-type: none"> • Witte zijde op de wond • Dagelijkse verbandwissel
Kliniderm superabsorbent dressing (absorberend verband)	<ul style="list-style-type: none"> • Neemt extreem veel vocht op • Superabsorberende korrels nemen wondvocht op en houden het vast • Kan 30x eigen gewicht vasthouden • Toplaag blijft droog waardoor zo min mogelijk kans op maceratie 	<ul style="list-style-type: none"> • Fixeren met een windsel

1201060 Druk- en zetfouten voorbehouden. Mediq Medeco behoudt zich, te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.